Selbsthaftende Kondom-Urinale aus Silikon





Um die passende Größe des InView Kondom-Urinals zu ermitteln, bestimmen Sie mit der InView Messschablone den Durchmesser Ihres Penis in der Mitte des Penisschaftes. Wenn Sie zwischen zwei Größen unsicher sind, testen Sie zunächst die kleinere Größe.



Waschen Sie den Penis gründlich mit pH-hautneutraler Seife. Reinigen Sie mit klarem Wasser und trocknen Sie die Haut sorgfältig ab. Verwenden Sie keine Öle, Lotionen oder Puder, da diese die Haftfähigkeit des Kondom-Urinals beeinträchtigen. Verwenden Sie InView Kondom-Urinale nicht bei Hautirritationen oder verletzter Haut.



Um die Schamhaare aus dem Versorgungsgebiet zu halten, können Sie ein Papiertuch zweimal zusammenfalten und dann die entstandene Ecke abreißen. Öffnen Sie das Papiertuch und überdecken Sie Ihre Haare, indem Sie den Penis durch das Loch schieben. Nachdem Sie das InView Kondom-Urinal angebracht haben, können Sie das Papiertuch einfach abreißen. Alternativ oder wenn Haare in das Versorgungsgebiet ragen, rasieren oder kürzen Sie die Haare mit einer Schere mit abgerundeter Spitze.



Öffnen Sie die Verpackung an der perforierten Stelle und entfernen Sie die Verpackung, indem Sie die Innenseite nach außen stülpen.



Entfernen Sie bei InView Extra und InView Special die weiße Kappe, indem Sie die Spitze des Kondom-Urinals oberhalb der weißen Kappe zusammendrücken und das Kondom-Urinal abnehmen.



Halten Sie den Penis fest. Drücken Sie die Kondom-Urinal-Spitze zusammen und legen Sie das Kondom-Urinal an der Eichel an. Wenn Sie unbeschnitten sind, ziehen Sie die Vorhaut nach vorn über die Eichel.



Entrollen Sie das InView Kondom-Urinal mit der anderen Hand über die gesamte Penislänge. Halten Sie dabei die Spitze weiter zusammengedrückt, um sicherzustellen, dass sich ein Reservoir zwischen Eichel und Ablass bildet. Dies gewährt ein sicheres Abfließen des Harns.



Umfassen Sie das Kondom-Urinal im Bereich der Klebefläche und drücken Sie es sanft an für einen sicheren Halt.



Schließen Sie das Kondom-Urinal an ein Ableitungssystem, wie zum Beispiel einen Beinbeutel (zur Tagesversorgung) oder einen Bett- oder Nachtbeutel (zur Nachtversorgung), an.



Zum Entfernen lösen Sie die Haftfläche durch Abrollen des InView Kondom-Urinals über die gesamte Penislänge sanft von der Haut ab.

Bei Hautirritationen oder auftretenden allergischen Reaktionen den Gebrauch bitte abbrechen. Falls das Kondom-Urinal ein Hütchen enthält, bitte dieses vor Gebrauch entfernen (siehe Illustration 5). Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung mit Informationen zu Verwendungszweck, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen.

Deutschland Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland

Riesstraße 25 D-80992 München

Beratung:

Telefon: 0800 1015023 (gebührenfrei)

Bestellung:

Telefon: 089 992886122 Telefax: 0800 4655432 (gebührenfrei) Mo.–Do.: 8.00–17.00 Uhr, Fr.: 8.00–16.00 Uhr

E-Mail: beratungsteam@hollister.com www.hollister.de

Österreich Hollister GmbH

Bergmillergasse 5/1/1 A-1140 Wien

Beratung:

Telefon: 01 87708000

Bestellung:

Telefon: 01 87708000 Telefax: 01 877080022

Mo.-Do.: 8.00-16.00 Uhr, Fr.: 8.00-14.00 Uhr

E-Mail: hollister.oesterreich@hollister.com

www.hollister.at

Schweiz Hollister

Bernstrasse 388 CH-8953 Dietikon

Beratung:

Telefon: 0800 553839 (gebührenfrei)

Bestellung:

Telefon: 044 7304505 Telefax: 044 7305444

Mo.-Do.: 8.00-12.00 Uhr, 13.30-17.00 Uhr Fr.: 8.00-12.00 Uhr, 13.30-16.00 Uhr

E-Mail: info@hollister.ch www.hollister.ch



