

*Dies ist eine Kurzanweisung für den Gebrauch und die Pflege der AnchorFast Fixierung.\*  
Die AnchorFast Fixierung für orale Endotrachealtuben ist indiziert, um medizinisch notwendige orale Endotrachealtuben mit einer Größe von 5 bis 10 mm Durchmesser sicher zu fixieren.*

## Anbringen der AnchorFast Fixierung

### Schritt 1

#### Vorbereitung der Haut


- Vor dem Anbringen der Fixierung muss die Haut des Patienten sauber, trocken und frei von öligen Rückständen sein.
- Keine Reinigungstücher zur Vorbereitung der Haut zusammen mit der Fixierung für orale Endotrachealtuben verwenden.

### Schritt 2

#### Abziehen des Schutzpapiers

- Ziehen Sie das Schutzpapier von den beiden Hautschutzplatten ab.


### Schritt 3

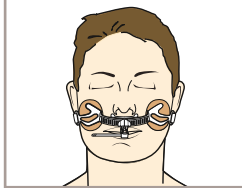

#### Anbringen der Fixierung für orale Endotrachealtuben

- Zentrieren Sie das Produkt so auf der Oberlippe des Patienten, dass das Schaumstoffpolster die Haut leicht berührt (ohne dabei Druck auszuüben).
- Die Klemmvorrichtung sollte ca. 13 mm unterhalb der Lippe positioniert sein.
- Drücken Sie die Hautschutzplatten auf die Haut des Patienten und halten Sie diese in situ, bis sie gut haften. Dies sollte ca. 30 Sekunden in Anspruch nehmen.



### Schritt 4

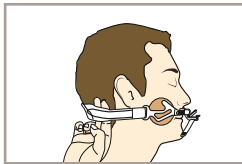

#### Anlegen des Nackenbands

- Führen Sie das schmale Ende des Nackenbands durch die Kunststoffschleife an der Schiene, um selbiges zu sichern.
- Befestigen Sie das Bandende mit dem Klettverschluss am Nackenband.
- Für einen bequemen und sicheren Sitz können Sie die Bänder auf beiden Seiten anpassen.
- Nicht zu fest anziehen. Es müssen zwei Finger zwischen das Nackenband und den Hinterkopf des Patienten passen.


### Schritt 5

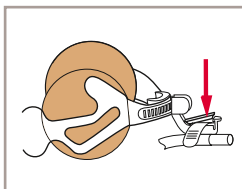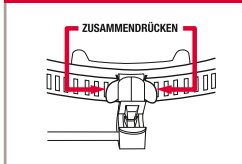


#### Fixieren des Tubus

- Drücken Sie die Laschen auf beiden Seiten des Schiebers zusammen und bewegen Sie die Klemme auf der Schiene entlang, bis sie sich oberhalb des Tubus befindet.
- Ziehen Sie das Schutzpapier vom Band ab, um die Klebeschicht freizulegen.
- Stellen Sie vor dem Anbringen des Klebebands am Tubus sicher, dass der Tubus trocken und frei von Rückständen ist.
- Wickeln Sie das Klebeband vorsichtig um den Tubus und ziehen den verbleibenden Teil des Bands durch die Klemme.
- Fixieren Sie das Band, indem Sie die Klemme zuschnappen lassen (Sie hören ein Klickgeräusch).

## Routinemäßige Pflege

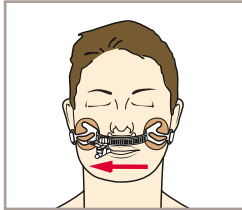

- Zum erneuten Positionieren des Tubus drücken Sie die Laschen an den Außenkanten zusammen; Sie können den Tubus dann in beide Richtungen bewegen.
- Sie sollten den Endotrachealtubus mindestens alle zwei Stunden\*\* oder je nach dem Zustand des Patienten häufiger seitlich neu positionieren, um das Risiko einer Verletzung der Haut und/oder der Lippen durch den andauernden Druck zu minimieren.

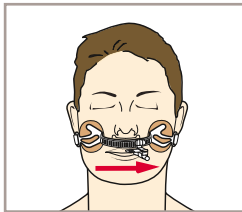

**\* Bitte lesen Sie sich die Gebrauchsanleitung für die AnchorFast Fixierung für orale Endotrachealtuben durch, bevor Sie das Produkt am Patienten anbringen.**

## Vorsichtsmaßnahmen

- Die Fixierung für orale Endotrachealtuben wurde an erwachsenen Patienten getestet. Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch an pädiatrischen Patienten bestimmt.
- Bei der Beurteilung der Eignung sind folgende Faktoren zu berücksichtigen: Patienten mit hervorstehenden Zähnen, Patienten ohne Zähne oder Patienten, die kein Oberkiefer-Gebiss tragen und bei denen daher die für die Verwendung der Fixierung für orale Endotrachealtuben erforderliche Oberkiefer-Stützwirkung fehlt, sowie Patienten mit vollen Lippen, dentalen Hilfsmitteln oder Gesichtsschwellungen.
- Zudem können die haftenden Hautschutzplatten evtl. bei Patienten mit Gesichtsbehaarung nicht sicher angebracht werden.
- Nach dem Anbringen der Fixierung für orale Endotrachealtuben sollten Sie den Patienten häufig überprüfen und sicherstellen, dass sowohl die Fixierung für orale Endotrachealtuben als auch der Endotrachealtubus sicher und korrekt positioniert sind.
- Die wiederholte Anpassung des Endotrachealtubus in distaler oder proximaler Richtung kann Auswirkungen auf die Klebefähigkeit des Bandes haben.
- Zur Minimierung des Risikos von Druckverletzungen sollten Sie Lippen und Haut des Patienten mindestens alle zwei Stunden\*\* bzw. je nach Zustand des Patienten häufiger untersuchen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn eine Rötung oder eine Reizung der Haut eintritt.
- Die Fixierung für orale Endotrachealtuben ist für den einmaligen Gebrauch indiziert. Nicht wiederverwenden, um eine adäquate Haftung zu gewährleisten.

### Deutschland

Hollister Incorporated  
Niederlassung Deutschland  
Riesstraße 25  
D-80992 München

### Beratung für Fachpersonal:

Telefon: 0 800/3 63 84 00 – gebührenfrei  
Telefax: 0 89/99 28 86-172

### Bestellung:

Telefon: 0 89/99 28 86-122  
Telefax: 0 800/4 65 54 32 – gebührenfrei  
Mo.–Do.: 8.00–17.00 Uhr, Fr.: 8.00–14.00 Uhr

E-Mail: [beratungsteam@hollister.com](mailto:beratungsteam@hollister.com)

[www.hollister.de](http://www.hollister.de)

\*\* Pieper, Barbara. „Mechanical Forces: Pressure, Shear, and Friction.“ Chapter 12 in *Acute & Chronic Wounds: Nursing Management*, 3rd ed., ed. Ruth A. Bryant & Denise P. Nix. (St. Louis: Mosby, Inc., 2007)

Panel for the Prediction and Prevention of Pressure Ulcers in Adults. „Pressure Ulcers in Adults: Prediction and Prevention.“ *Clinical Practice Guidelines*, Number 3. AHCPublication No. 92-0047. (Rockville, MD: Agency for Health Care Policy and Research, Public Health Service, U.S. Department of Health and Human Services. May 1992).