

VaPro Plus

Berührungsfreier hydrophiler Einmalkatheter



1

Waschen Sie die Hände mit einer milden Seife und Wasser.



2

Um die Verpackung zu öffnen, stecken Sie Ihre Zeigefinger etwa bis zur Hälfte durch die vorgestanzten Fingeröffnungen.




3

Ziehen Sie die Verpackung mit leichtem Zug entlang dem markierten Pfeil, so weit Sie möchten, nach unten auf. Entnehmen Sie den Katheter und entfernen Sie das Papierband, welches den Beutel umschließt, z.B. indem Sie das Papierband in Richtung des Katheters schieben.



4

Legen Sie den Katheter anschließend zurück in die geöffnete Verpackung.

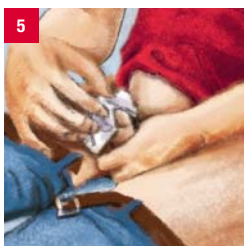

5

Nehmen Sie den Penis in die Hand. Schieben Sie die Vorhaut zurück und reinigen Sie die Eichel und den Harnröhreneingang mit einer milden, nicht parfümierten Seife oder nicht alkoholischen feuchten Reinigungstüchern. Desinfizieren Sie den Bereich anschließend mit einem Schleimhautdesinfektionsmittel. Beachten Sie hierbei insbesondere die empfohlene Einwirkzeit.



6

Halten Sie den Katheter in einer Hand und schieben Sie (gegebenenfalls mit der anderen Hand) den Katheter nach vorne, bis dessen Spitze in der Schutzhülse steckt. Dadurch wird diese während des Einführens stabilisiert. Entfernen Sie nun die rote Sterilschutzkappe von der Schutzhülse des Katheters. Achten Sie darauf, dass der Katheter noch nicht aus der Schutzhülse heraus sichtbar ist.

(bitte wenden)



Greifen Sie den Katheter unterhalb des Tellers der Schutzhülse und führen Sie die Schutzhülse vollständig in die Harnröhre ein, bis der Teller in Kontakt mit der Harnröhrenöffnung kommt. Schieben Sie nun den Katheter in die Harnröhre, bis der Urin zu fließen beginnt. Achten Sie dabei darauf, dass sich die Position der Schutzhülse nicht verändert. Der Auffangbeutel sollte während dieses Vorgangs in waagerechter Lage positioniert sein. Nach Ende des Urinflusses ziehen Sie den Katheter langsam ca. 2,5 cm zurück, damit auch der restliche noch verbliebene Urin aus der Blase entleert wird. Entfernen Sie dann den Katheter vollständig.



Bevor Sie den Katheter entsorgen, entleeren Sie den Auffangbeutel, indem Sie ihn an der Perforation aufreißen und den Urin in die Toilette oder einen Auffangbehälter entleeren.



Entsorgen Sie den Katheter in einem Abfalleimer. Spülen Sie ihn nicht in einer Toilette hinunter. Die Folienverpackung ist gemäß den Vorschriften für den grünen Punkt zu entsorgen.



Waschen Sie die Hände mit einer milden Seife und Wasser.

Achtung: Um das Infektionsrisiko und/oder das Risiko anderer Komplikationen zu minimieren, darf derselbe Katheter nicht mehrmals verwendet werden. Entsorgen Sie den Katheter nach dessen Gebrauch. Sollten Schmerzen oder Beschwerden beim Gebrauch auftreten, fahren Sie mit der Benutzung nicht fort und suchen Sie umgehend einen medizinischen Ansprechpartner auf.

Hinweis: Bevor Sie dieses Hilfsmittel verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie (i) alle Informationen über die Anwendung des Produktes einschließlich aller Hinweise und der Gebrauchsanweisung sowie (ii) alle anderen Packungsbeilagen und Etiketten, die bei der Produktlieferung enthalten waren, aufmerksam gelesen haben.

Bitte suchen Sie Ihren Arzt vor Verwendung des Produktes auf, wenn bei Ihnen eine der folgenden Erkrankungen vorliegt: Urethrruptur, unerklärliche Harnröhrenblutungen, Harnröhrenverengungen, Urethritis (Entzündung der Harnröhre), Prostatitis (Entzündung der Prostata), Epididymitis (Entzündung der Samenleiter). Intermittierende Selbstkatheterisierung sollte nur nach ärztlicher Anordnung und unter Beachtung der Anwendungshinweise erfolgen. Befolgen Sie stets die Vorgaben Ihres Arztes oder Ihres medizinischen Ansprechpartners. Intermittierende Selbstkatheterisierung (ISK) wird üblicherweise mindestens viermal in Abständen von 6–8 Stunden durchgeführt. Sollten Sie Fragen zur Katheterisierung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihren medizinischen Ansprechpartner.

Hinweis: Lagern Sie die Katheterboxen bitte in horizontaler Lage und bei normaler Raumtemperatur. Nicht verfügbar in den Vereinigten Staaten.

Deutschland

Hollister Incorporated
Niederlassung Deutschland
Riesstraße 25
D-80992 München

Beratung für Betroffene:
Telefon: 0 800/4 65 54 78 – gebührenfrei

Beratung für Fachpersonal:
Telefon: 0 800/1 01 50 23 – gebührenfrei

Bestellung:
Telefon: 0 89/99 28 86-122
Telefax: 0 800/4 65 54 32 – gebührenfrei
Mo.–Do.: 8.00–17.00 Uhr, Fr.: 8.00–14.00 Uhr
E-Mail: hollister.deutschland@hollister.com

www.hollister.de

Schweiz

Hollister
Bernstrasse 388
CH-8953 Dietikon

Beratung:
Telefon: 0 800/55 38 39 – gebührenfrei

Bestellung:
Telefon: 044/730 45 05
Telefax: 044/730 54 44
Mo.–Fr.: 8.00–12.00 Uhr, 13.00–16.00 Uhr

E-Mail: info@hollister.ch