


Gebrauchsanweisung für Pouchkins

Zweiteiliges Stomaversorgungssystem für die Kinderversorgung

Vor der Versorgung


1

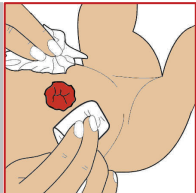

Stellen Sie sicher, dass die Haut um das Stoma sauber und trocken ist. Keine Öle, Babypuder oder rückfettende Lotionen verwenden, die die Haftung der Hautschutzplatte beeinträchtigen.


Ausschneiden des Hautschutzes

2

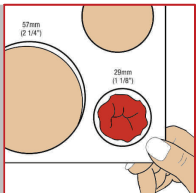


Messen Sie die Stomagröße genau ab. Eine passend zugeschnittene Stomaversorgung schützt die Haut zuverlässig vor Irritationen.

3

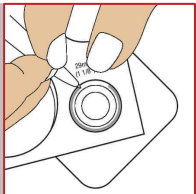

Zeichnen Sie den Stomadurchmesser auf der Abziehfolie der Basisplatte an.


4

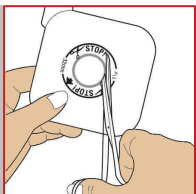

Schneiden Sie nicht über den auf der Abziehfolie aufgedruckten äußersten Kreis hinaus.


Anlegen der Basisplatte

5

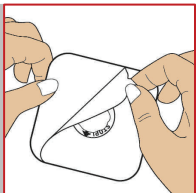

Entfernen Sie die Abziehfolie von der Basisplatte.


6

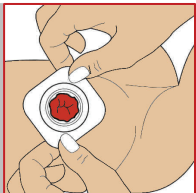

Legen Sie die Öffnung der Hautschutzplatte genau über dem Stoma an und drücken Sie den Hautschutz von unterhalb des Stomas beginnend sanft auf die Haut.

Anbringen des Beutels


7

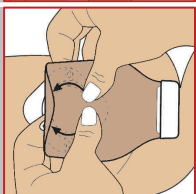

Nehmen Sie den Beutel in die Hand und fassen Sie mit dem Daumen unter den freistehenden Rastring der Basisplatte. Legen Sie die untere Kante des Beutelrings auf den unteren Teil des Rastrings an der Basisplatte und drücken Sie beide Teile nach und nach rundherum zusammen, bis sie vollständig eingerastet sind. Ziehen Sie den Beutel leicht nach unten, um den sicheren Sitz zu überprüfen. Halten Sie dabei die andere Hand gegen die Basisplatte.


Verschließen des Ausstreifbeutels mit integriertem Lock´n Roll Verschluss

8

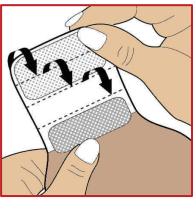

Falten Sie das Ende des Auslasses 3 mal in Richtung der Beutelvorderseite, bis die Verschlussstreifen aufeinander liegen.

9

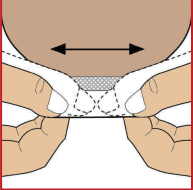

Drücken Sie die Verschlussstreifen auf der ganzen Länge fest aufeinander, bis Sie das Verschließen des Beutels spüren.


Entleeren des Ausstreifbeutels mit integriertem Lock´n Roll Verschluss

10



Öffnen Sie den Beutelverschluss und falten Sie ihn auf. Fassen Sie an beide Seiten des Auslasses und drücken Sie diese gegeneinander, um den Beutel zu öffnen. Die Innenseiten des Beutelauslasses können nun gereinigt werden. Verschließen Sie den Beutel wieder gemäß Abbildung 8 und 9.


11

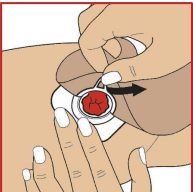

Entfernen des Beutels

Drücken Sie den Rastring der Basisplatte an der Stelle der Beutelabziehlasche an den Körper. Ziehen Sie dann den Beutel-Rastring mit Hilfe der daran befindlichen Abziehlasche langsam nach unten ab.


12

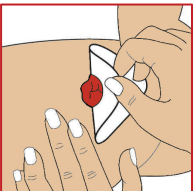

Entfernen der Basisplatte

Halten Sie den umliegenden Hautbereich fest. Lösen Sie die Basisplatte beginnend am oberen Rand vorsichtig von der Haut und ziehen Sie diese langsam von oben nach unten ab.

13

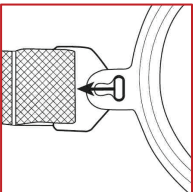

Verwendung eines Gürtels, falls zusätzlicher Halt erwünscht

Halten Sie den Gürtel so, dass die Knöpfe an den Gürtelschnallen vom Körper des Kindes wegzeigen. Stecken Sie einen Knopf in die entsprechende Öffnung der Gürteltasche am Rastring des Beutels. Ziehen Sie nun den Gürtel in Richtung des äußeren Gürteltaschenrandes, bis er sicher einschnappt. Legen Sie den Gürtel um den Körper und wiederholen Sie den beschriebenen Vorgang mit dem anderen Gürtelende. Mit dem Kunststoffschieber kann der Gürtel bei Bedarf verlängert oder verkürzt werden.

Vermeiden Sie eine Überfüllung des Beutels. Entleeren Sie ihn, wenn er zu einem Drittel gefüllt ist. Werfen Sie den Beutel nicht in die Toilette.

Deutschland

Hollister Incorporated
Niederlassung Deutschland
Riesstraße 25
D-80992 München

Beratung zur Kinderversorgung:
Telefon: 0 800/5 60 07 59 – gebührenfrei

Beratung für Fachpersonal:
Telefon: 0 800/1 01 50 23 – gebührenfrei

Bestellung:
Telefon: 0 89/99 28 86-122
Telefax: 0 800/4 65 54 32 – gebührenfrei
Mo.-Do.: 8.00-17.00 Uhr, Fr.: 8.00-14.00Uhr
E-Mail: hollister.deutschland@hollister.com

Österreich

Hollister GmbH
Heinrich Collin-Str. 1
A-1140 Wien

Beratung:
Telefon: 0 800/80 81 88 – gebührenfrei

Bestellung:
Telefon: 01/8 77 08 00-0
Telefax: 01/8 77 08 00-22
Mo.-Do.: 8.00-16.00 Uhr, Fr.: 8.00-14.00Uhr
E-Mail: hollister.oesterreich@hollister.com

Schweiz

Hollister
Bernstrasse 388
CH-8953 Dietikon

Beratung:
Telefon: 0 800/55 38 39 – gebührenfrei

Bestellung:
Telefon: 0 44/7 30 45-05
Telefax: 0 44/7 30 54-44
Mo.-Fr.: 8.00-12.00 Uhr, 13.00-16.00 Uhr
E-Mail: info@hollister.ch

www.hollister.de