

Für Männer in folgenden Größen und Ausführungen erhältlich

	Größe	Länge	Spitze	Farbe des Trichters	Bestell-Nr.	PZN (0)	Packungs-inhalt
Infyna Gebrauchsfertige hydrophile intermittierende Einmalkatheter D: HMV: 15.25.14.7088 eCI@ss 10.0: 34-25-01-08	8 Ch	40 cm	Nelaton	●	88084	13750872	30
	10 Ch	40 cm	Nelaton	●	88104	13750889	30
	12 Ch	40 cm	Nelaton	○	88124	13750895	30
	14 Ch	40 cm	Nelaton	●	88144	13750903	30
	16 Ch	40 cm	Nelaton	●	88164	13750926	30
Infyna Plus Gebrauchsfertige hydrophile intermittierende Einmalkatheter mit Beutel D: HMV: 15.25.14.9051 eCI@ss 10.0: 34.25-01-10	8 Ch	40 cm	Nelaton	●	86084	13750990	30
	10 Ch	40 cm	Nelaton	●	86104	13751009	30
	12 Ch	40 cm	Nelaton	○	86124	13751015	30
	14 Ch	40 cm	Nelaton	●	86144	13751021	30
	16 Ch	40 cm	Nelaton	●	86164	13751038	30

Hinweis: Infyna ist auch als Frauenkatheter sowohl mit als auch ohne Beutel verfügbar.



Dieser Einmalkatheter ist ein biegsames, röhrenförmiges Hilfsmittel, das bei männlichen, weiblichen und pädiatrischen Patienten, bei denen Urin aus der Blase abgeleitet werden muss, durch die Harnröhre eingeführt wird.

- Gebrauchsfertiger Einmalkatheter
- Hydrophil beschichtet
- 2 sanfte, abgerundete Katheteraugen
- Farbcodierte Ableitungstrichter
- Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt
- Führungshilfe ermöglicht Katheterisieren in der "No-touch"-Technik

WARNHINWEIS: Um einem Infektionsrisiko oder anderen Komplikationen vorzubeugen, darf dasselbe Produkt nicht mehrmals verwendet werden.

WARNHINWEIS: Wenn eine der folgenden Indikationen auftritt, suchen Sie bitte vor dem Gebrauch dieses Produktes den Arzt auf:

- Harnröhrenriss
- Ungeklärte Blutungen aus der Harnröhre
- Ausgeprägte Harnröhrenstriktur
- Via Falsa
- Urethritis-Entzündung der Harnröhrenschleimhaut
- Prostatitis-Entzündung der Prostata
- Epididymitis-Entzündung des Nebenhodens

Der intermittierende Selbstkatheterismus sollte dem Behandlungsplan und der Empfehlung Ihres Arztes folgen und in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung durchgeführt werden. Da die Häufigkeit der Katheterisierung bei jeder Person anders ist, sollte Ihr Arzt eine Empfehlung über die Häufigkeit Ihrer Katheterisierung abgeben. Sollten Sie weitere Fragen zu Ihrer Katheterisierung haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt.

BITTE BEACHTEN: Lagern Sie die Katheterboxen immer in horizontaler Lage bei normaler Raumtemperatur.

Dieses Produkt besteht aus einem Trichter aus Polyvinylchlorid und dem phthalatfreien Schlauch.

REFERENZEN

¹ Studie zur Wassermenge beim Onli / Infyna und Wettbewerbsprodukten. Hollister 2015

² Analyse des Potentials zur Fleckenbildung auf Kleidung durch Tropfen für Onli / Infyna und Wettbewerbsprodukte. Hollister 2015.

Deutschland

Hollister Incorporated
Niederlassung Deutschland
Riesstraße 25
D-80992 München

Beratung:
Telefon: 0800 1015023 (gebührenfrei)

Bestellung:
Telefon: 089 992886122
Telefax: 0800 4655432 (gebührenfrei)
Mo. – Do.: 8.00 – 17.00 Uhr, Fr.: 8.00 – 16.00 Uhr

E-Mail: beratungsteam@hollister.com

www.hollister.de

Österreich

Hollister GmbH
Bergmillergasse 5/1/1
A-1140 Wien

Beratung und Bestellung:
Telefon: 01 87708000
Telefax: 01 877080022
Mo. – Do.: 8.00 – 16.00 Uhr, Fr.: 8.00 – 14.00 Uhr

E-Mail: hollister.oesterreich@hollister.com

www.hollister.at

Schweiz

Hollister
Bernstrasse 388
CH-8953 Dietikon

Beratung:
Telefon: 0800 553839 (gebührenfrei)

Bestellung:
Telefon: 044 7304505
Telefax: 044 7305444
Mo. – Do.: 8.00 – 12.00 Uhr, 13.30 – 17.00 Uhr
Fr.: 8.00 – 12.00 Uhr, 13.30 – 16.00 Uhr

E-Mail: info@hollister.ch

www.hollister.ch

Fühlen Sie sich beim Katheterisieren nicht wie ein Patient.






Infyna definiert das Katheterisieren neu.

Wir haben Ihnen zugehört und mit Infyna und Infyna Plus Produkte entwickelt, die genau Ihren Bedürfnissen entsprechen.



Müheloses Katheterisieren und Schutz.

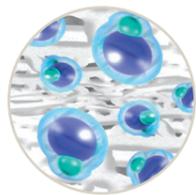

Gebrauchsfertig, nahezu tropffrei¹

- Die innovative Wasserdampftechnologie sorgt für einen sofort gebrauchsfertigen und vollständig hydrierten Katheter. Eine Zugabe von Wasser oder das Brechen eines Sachets ist nicht erforderlich.
- Sterile Wasserdampfmoleküle in der Verpackung aktivieren die hydrophile Beschichtung des Katheters und sorgen für dessen Gleitfähigkeit. Damit ist eine sofortige Gebrauchsfertigkeit noch vor dem Öffnen der Verpackung gewährleistet.



Keine Flecken

- Beschichtungsflüssigkeit hinterlässt auf Jeansstoff, Leinen und Polyester keine Flecken²



Einfaches und sicheres Katheterisieren

- Optimale Kontrolle durch eine ausgewogene Balance zwischen Flexibilität und Festigkeit
- Ergonomisch geformte Führungshilfe garantiert Katheterisieren in der "No-touch"-Technik
- Atraumatische Katheteraugen sorgen für eine sanfte und sichere Anwendung



Einfaches Öffnen

- Leichtes Öffnen dank Fingerloch
- Langer Aufreißfaden ermöglicht einfache Entnahme

Infyna.
Ein neues Erlebnis.

Einfach. Bereit.