





Waschen Sie Ihre Hände mit einer milden Seife und legen Sie alle Materialien bereit, die Sie zum Katheterisieren benötigen. Abschließend desinfizieren Sie Ihre Hände.



Um die Verpackung zu öffnen, stecken Sie einen Finger etwa bis zur Hälfte durch die vorgestanzte Fingeröffnung. Ziehen Sie die Verpackung mit leichtem Zug entlang des markierten Pfeils nach unten auf. Lassen Sie den Katheter in der geöffneten Verpackung auf einer sicheren Ablagefläche liegen, während Sie sich anschließend auf das Katheterisieren vorbereiten.

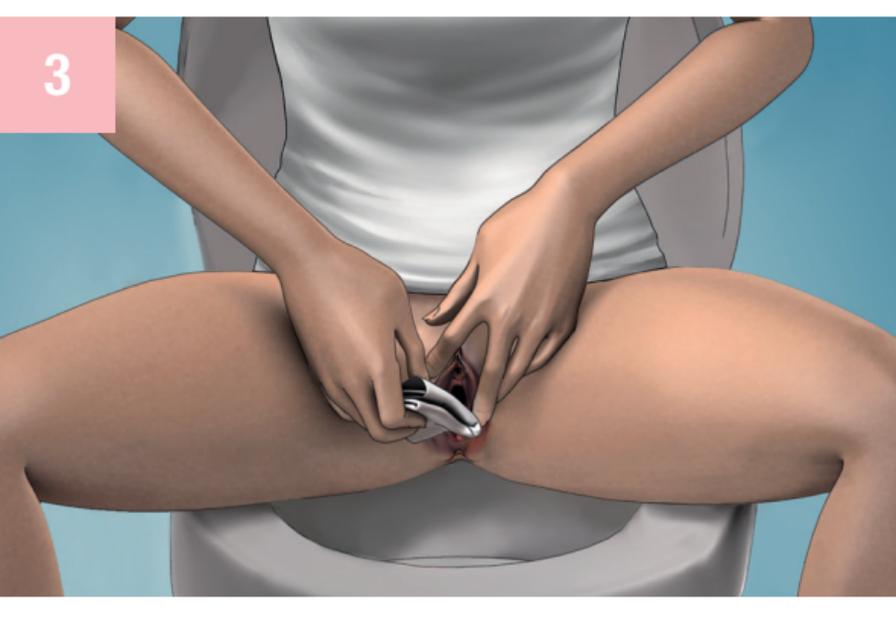

Spreizen Sie die Schamlippen und reinigen Sie den Harnröhreneingang mit einer milden, nicht parfümierten Seife oder nicht alkoholischen feuchten Reinigungstüchern. Desinfizieren Sie den Bereich anschließend mit einem Schleimhautdesinfektionsmittel. Achten Sie dabei auf die vom Hersteller empfohlene Einwirkzeit.

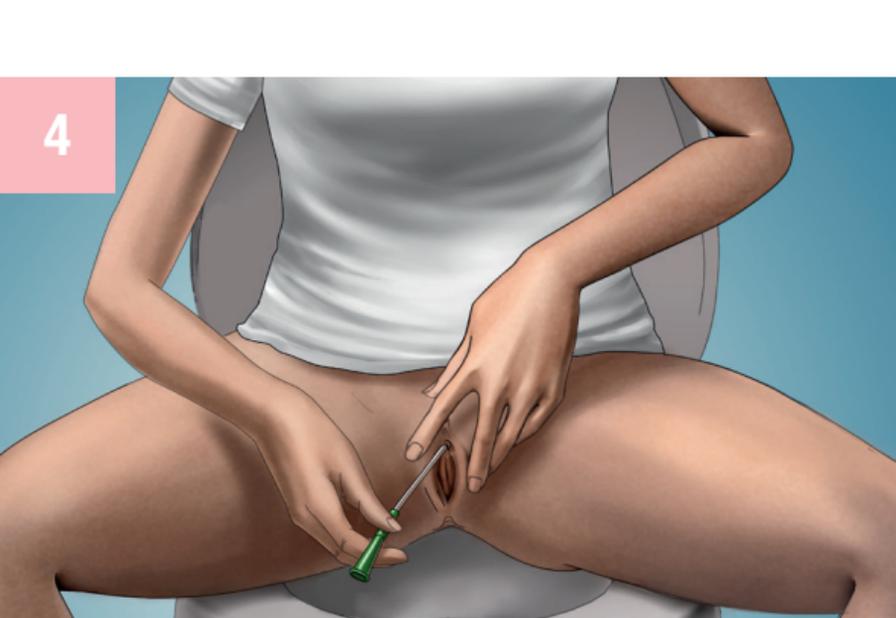

Führen Sie nun den Katheter in die Harnröhre ein, bis der Urin zu fließen beginnt. Halten Sie das Katheterende (falls kein Auffangbeutel vorhanden) direkt in die Toilette, so dass der Urin abfließen kann. Nach Ende des Urinflusses ziehen Sie den Katheter zunächst langsam ca. 2,5 cm heraus, damit auch der restliche noch verbliebene Urin aus der Blase entleert wird. Entsorgen Sie den Katheter in einem Abfalleimer. Spülen Sie ihn nicht in der Toilette hinunter.



Bei Verwendung eines Kathetersystems mit Beutel:

Öffnen Sie den Auffangbeutel an der vorgesehenen Stelle und entleeren Sie ihn in die Toilette.

Entsorgen Sie den Katheter in einem Abfalleimer.

Spülen Sie ihn nicht in der Toilette hinunter.

Die Folienverpackung ist gemäß den Vorschriften für den Grünen Punkt zu entsorgen.



Waschen Sie Ihre Hände mit einer milden Seife und Wasser.



© 2017 Hollister Incorporated. Hollister und Logo sowie **Infyna und Infyna Plus** sind
Warenzeichen von Hollister Incorporated.

LI2264/04.17

Infyna

Gebrauchsfertige hydrophile intermittierende Einmalkatheter





Hollister Incorporated

Niederlassung Deutschland

Riesstraße 25

D-80992 München

Beratung:

Telefon: 0 800 / 1 01 50 23

(gebührenfrei)

beratungsteam@hollister.com

www.hollister.de