

Eine Hollister Technologie

.....

**Advance**  
**Advance Plus**  
**Advance Plus Pocket**

Berührungsfreie Einmalkatheter mit Gleitgel

*So einfach. So gut.*



 Hollister



# Advance/Advance Plus/Advance Plus Pocket

Berührungsfreier Einmalkatheter mit Gleitgel

## So einfach. So gut.

**Bei Hollister Kontinenzversorgung steht der Mensch im Mittelpunkt.** Wir verstehen unsere Aufgabe darin, einen Beitrag zu erhöhter Lebensqualität zu leisten. Alles, was wir tun, folgt unserem Leitsatz: **People First.**


**Advance, Advance Plus und Advance Plus Pocket Einmalkatheter** von Hollister wurden in enger Zusammenarbeit mit Betroffenen entwickelt, um damit die Bedürfnisse nach einer optimalen Versorgung zu erfüllen. So sorgen das einzigartige Gleitgel-Reservoir, die Schutzhülse und die sterile Folienumhüllung für eine sofortige, gebrauchsfertige und sichere Handhabung.

### Sicherheit durch berührungsfreies Einführen

Die sterile Folienumhüllung schützt den Katheter bis zur Einführung in die Harnröhre vor Keimen aus der Umgebung. In Labortests wurden herkömmlich beschichtete Katheter mit dem Advance Einmalkatheter verglichen.

Untersucht wurde dabei die Bakterienübertragung auf den Katheter während der Vorbereitung und Einführung entsprechend der Gebrauchsanweisung.

Getestet wurde auf *Staphylococcus aureus* und *Escherichia coli*. Das Ergebnis zeigt deutlich, dass der Advance Einmalkatheter – aufgrund seiner berührungsfreien Einführung – eine signifikant geringere Kontamination aufweist.

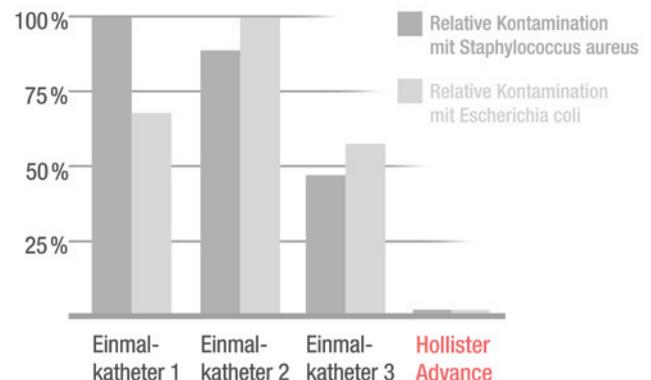


Hudson, E., Murahata, R. I.: The „no-touch“ method of intermittent urinary catheter insertion: can it reduce the risk of bacteria entering the bladder? *Spinal Cord*, 2005; 611-614



## People First: Bastien Perret, La Plagne, Frankreich

Für Bastien Perret war Sport schon seit jeher ein wichtiger Bestandteil seines Lebens. Gemäß seinem Motto „Für jedes Problem gibt es eine Lösung“ suchte er nach seinem Unfall nach Möglichkeiten, weiterhin sportlich aktiv zu sein – und stieß auf eine Vielfalt an Angeboten. „Nun lebe ich mein Leben wie zuvor – natürlich ist es jetzt anders, aber mein Leben ist voller Abenteuer und großartiger Erlebnisse!“ Heute motiviert er andere Betroffene zum Sport, indem er ihnen z. B. den Gebrauch mit einem Wakeboard zeigt, wie kürzlich auf seiner Reise durch 12 Hauptstädte Europas.

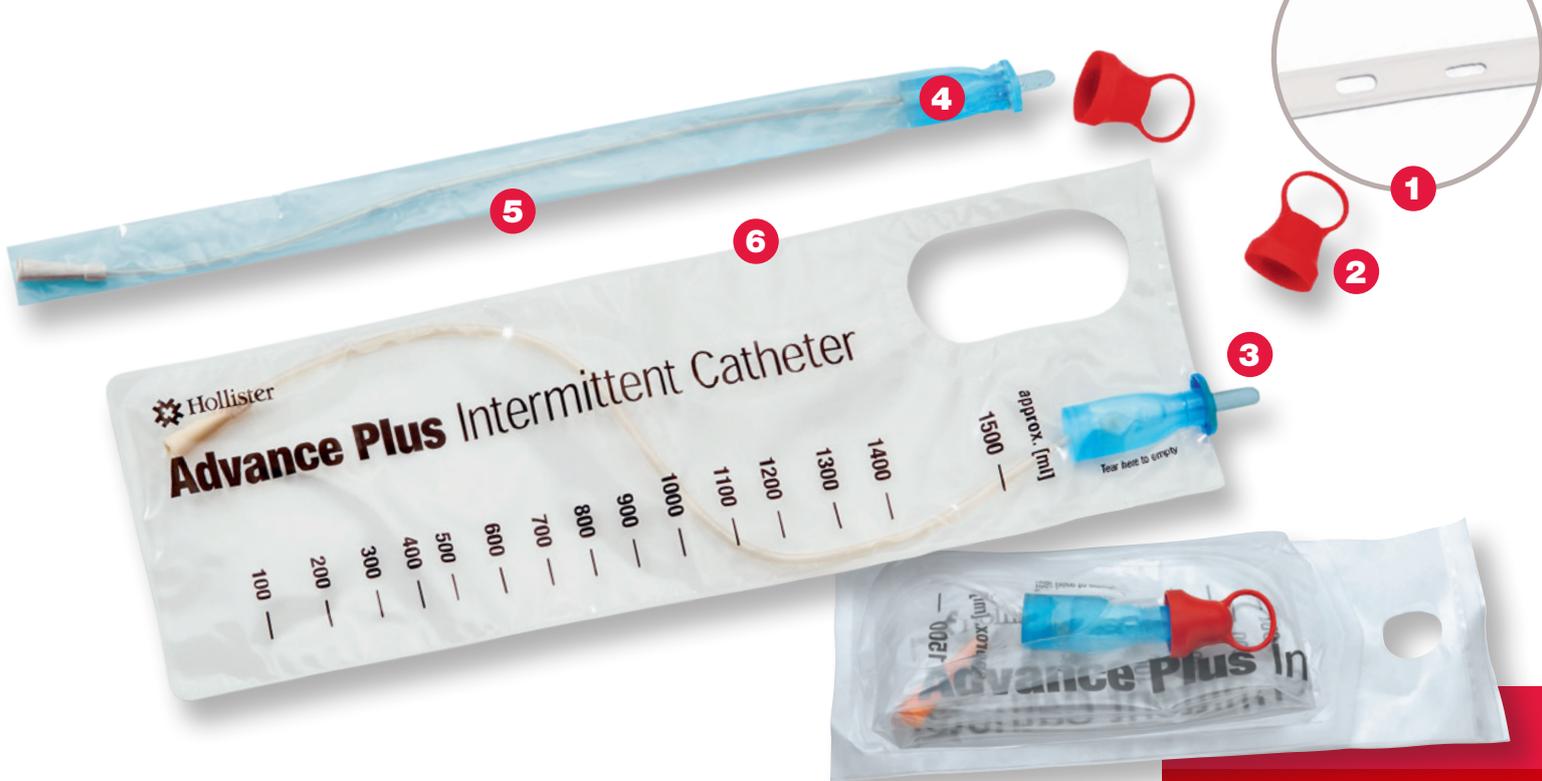


- ① **Sanfte Katheteraugen** sorgen für eine sanfte und sichere Anwendung und **minimieren das Risiko traumatischer Verletzungen** der Harnröhre beim Einführen und Entfernen des Katheters.
- ② **Sterilschutzkappe** bewahrt die Sterilität der Katheterspitze nach dem Öffnen der Verpackung. Die Ringkappe **gewährleistet ein einfaches Abnehmen**.
- ③ **Schutzhülse**, um den Katheter vor Kontakt mit Bakterien im Eingangsbereich der Harnröhre zu schützen. **Die Schutzhülse hilft dabei, das Risiko von Harninfektionen zu minimieren**.
- ④ **Gleitgel-Reservoir** sorgt für eine **gleichmäßige Benetzung des Katheters** und für eine **dauerhaft hohe Gleitfähigkeit** beim Einführen und Entfernen des Katheters. Durch leichtes Drücken lässt sich das Gleitgel entsprechend dem persönlichen Bedarf individuell dosieren.
- ⑤ **Sterile Folienumhüllung** ermöglicht eine **berührungsfreie und sichere Anwendung**, weil der Katheter vor Kontamination mit Keimen geschützt wird.
- ⑥ **Auffangbeutel** – bei Advance Plus und Advance Plus Pocket. Der integrierte Auffangbeutel hat ein **Fassungsvermögen von 1,5 Liter** und ermöglicht eine **diskrete und sichere Entleerung der Harnblase**, sowohl zu Hause als auch unterwegs.

**Jetzt neu:**  
**Advance Plus**  
**Pocket** – passt in  
 jede Hosentasche.

Der Gel-Einmalkatheter mit Auffangbeutel verfügt über alle Eigenschaften von Advance Plus, befindet sich jedoch in einer deutlich kleineren Verpackung.

Lagerung, Transport, Entsorgung – mit dem diskreten Advance Plus Pocket kein Problem!

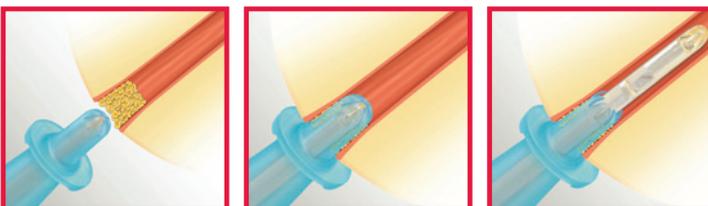

Bei den meisten Menschen befinden sich die Keime der Harnröhre überwiegend in den vorderen 15 mm. Die bewährte Schutzhülse überbrückt diesen Bereich und schützt den Katheter vor direktem Kontakt mit den Keimen. Der Katheter kommt erst nach dieser kritischen Zone von 15 mm mit der Harnröhre in Kontakt. Das Risiko einer Bakterienübertragung in die Harnblase wird dadurch gesenkt.




Besuchen Sie uns auch auf Facebook unter [www.facebook.com/HollisterDeutschland](http://www.facebook.com/HollisterDeutschland) und werden Sie Fan!

Kennen Sie schon unseren  **Hollister Lifeblog** Jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen.  
MITTEN IM LEBEN

[hollister-lifeblog.de](http://hollister-lifeblog.de)

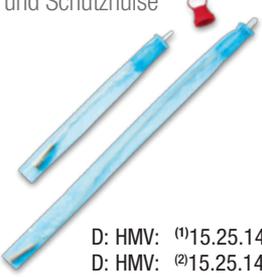

	Größe	Länge	Spitze	Farbe des Trichters	Bestell-Nr.	Pharma-Zentral-Nr. D	CH	Packungs-inhalt	
<b>Advance</b> Einmalkatheter mit Gleitgel und Schutzhülse  D: HMV: <sup>(1)</sup> 15.25.14.5029 D: HMV: <sup>(2)</sup> 15.25.14.5023 D: HMV: <sup>(3)</sup> 15.25.14.5026 D: HMV: <sup>(4)</sup> 15.25.14.5027 CH: MiGel: 15.10.03.01.1	6 Ch	20 cm	Nelaton	●	92062 <sup>(1)</sup>	3036926	2507080	25	
	8 Ch	20 cm	Nelaton	●	92082 <sup>(1)</sup>	3036932	2507097	25	
	10 Ch	20 cm	Nelaton	●	92102 <sup>(2)</sup>	3036961	2507105	25	
	12 Ch	20 cm	Nelaton	○	92122 <sup>(2)</sup>	3037009	2507111	25	
	14 Ch	20 cm	Nelaton	●	92142 <sup>(2)</sup>	3037021	2507128	25	
	10 Ch	40 cm	Nelaton	●	92104 <sup>(3)</sup>	3037038	2507134	25	
	12 Ch	40 cm	Nelaton	○	92124 <sup>(3)</sup>	3037096	2507140	25	
	14 Ch	40 cm	Nelaton	●	92144 <sup>(3)</sup>	3037156	2507157	25	
	16 Ch	40 cm	Nelaton	●	92164 <sup>(3)</sup>	3037185	2507163	25	
	18 Ch	40 cm	Nelaton	●	92184 <sup>(3)</sup>	3037216	2507186	25	
	12 Ch	40 cm	Tiemann	○	99124 <sup>(4)</sup>	3037357	2705176	25	
	14 Ch	40 cm	Tiemann	●	99144 <sup>(4)</sup>	3037392	5705182	25	
	16 Ch	40 cm	Tiemann	●	99164 <sup>(4)</sup>	3037400	2705199	25	
	<b>Advance Plus</b> Einmalkatheter im Auffangbeutel mit Gleitgel und Schutzhülse  D: HMV: <sup>(5)</sup> 15.25.14.8020 D: HMV: <sup>(6)</sup> 15.25.14.8019 D: HMV: <sup>(7)</sup> 15.25.14.8018 CH: MiGel: 15.10.03.01.1	6 Ch	20 cm	Nelaton	●	94062 <sup>(5)</sup>	2726037	2763498	25
		8 Ch	20 cm	Nelaton	●	94082 <sup>(5)</sup>	2726095	2763506	25
		10 Ch	20 cm	Nelaton	●	94102 <sup>(5)</sup>	2726103	2763512	25
12 Ch		20 cm	Nelaton	○	94122 <sup>(5)</sup>	2726126	2763529	25	
14 Ch		20 cm	Nelaton	●	94142 <sup>(5)</sup>	2726132	2763535	25	
6 Ch		40 cm	Nelaton	●	94064 <sup>(6)</sup>	2258895	2507192	25	
8 Ch		40 cm	Nelaton	●	94084 <sup>(6)</sup>	2258903	2507200	25	
10 Ch		40 cm	Nelaton	●	94104 <sup>(6)</sup>	2258926	2507217	25	
12 Ch		40 cm	Nelaton	○	94124 <sup>(6)</sup>	2258932	2507223	25	
14 Ch		40 cm	Nelaton	●	94144 <sup>(6)</sup>	2258949	2507246	25	
16 Ch		40 cm	Nelaton	●	94164 <sup>(6)</sup>	2258955	2507252	25	
18 Ch		40 cm	Nelaton	●	94184 <sup>(6)</sup>	2258961	2507269	25	
12 Ch		40 cm	Tiemann	○	95124 <sup>(7)</sup>	2258978	2507275	25	
14 Ch		40 cm	Tiemann	●	95144 <sup>(7)</sup>	2258984	2507281	25	
16 Ch		40 cm	Tiemann	●	95164 <sup>(7)</sup>	2258990	2507298	25	
<b>Advance Plus Pocket</b>  D: HMV: 15.25.14.8039 CH: MiGel: 15.10.03.01.1L		10 Ch	40 cm	Nelaton	●	93104	9928011	5335076	25
		12 Ch	40 cm	Nelaton	○	93124	9928028	5335082	25
		14 Ch	40 cm	Nelaton	●	93144	9928034	5335099	25
	16 Ch	40 cm	Nelaton	●	93164	9928040	5335107	25	



Jetzt mehr zu unseren Produkten erfahren – schnell und einfach mit QR-Code.

#### Deutschland

Hollister Incorporated  
Niederlassung Deutschland  
Riesstraße 25, D-80992 München  
[www.hollister.de](http://www.hollister.de)

#### Beratung für Betroffene:

Telefon: 0 800/4 65 54 78 – gebührenfrei

#### Beratung für Fachpersonal:

Telefon: 0 800/1 01 50 23 – gebührenfrei

#### Bestellung:

Telefon: 0 89/99 28 86-122

Telefax: 0 800/4 65 54 32 – gebührenfrei

Mo.–Do.: 8.00–17.00 Uhr, Fr.: 8.00–14.00 Uhr

E-Mail: [hollister.deutschland@hollister.com](mailto:hollister.deutschland@hollister.com)

#### Schweiz

Hollister  
Bernstrasse 388  
CH-8953 Dietikon

#### Beratung:

Telefon: 0 800/55 38 39 – gebührenfrei

#### Bestellung:

Telefon: 044/730 45-05

Telefax: 044/730 54-44

Mo.–Fr.: 8.00–12.00 Uhr, 13.00–16.00 Uhr

E-Mail: [info@hollister.ch](mailto:info@hollister.ch)

#### Österreich

Hollister GmbH  
Heinrich-Collin-Straße 1  
A-1140 Wien

#### Beratung und Bestellung:

Telefon: 01/8 77 08 00-0

Telefax: 01/8 77 08 00-22

Mo.–Do.: 8.00–16.00 Uhr, Fr.: 8.00–14.00 Uhr

E-Mail: [hollister.oesterreich@hollister.com](mailto:hollister.oesterreich@hollister.com)